

Remplacement du filtre d'entrée d'air Philips Respironics V60

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le filtre d'entrée d'air sur le Philips Respironics V60.

Rédigé par: knipwim



Ce document a été créé le 2021-02-24 11:22:23 AM (MST).

ID de tutoriel: 132280 - Brouillon: 2020-05-29

INTRODUCTION

Le filtre d'entrée d'air est situé sur le panneau latéral à droite de l'appareil. En accord avec le manuel de d'entretien, le filtre d'entrée d'air doit être inspecté et remplacé si besoin. Les environnements avec d'avantage de peluches et de poussière requièrent un remplacement plus fréquent.

VEUILLEZ NOTER: ce tutoriel de remplacement est développé et traduit par l'équipe iFixit en ce basant sur le manuel d'entretien Philips. Ni ifixit ni ce tutoriel de réparation ne sont sponsorisés ou affiliés à Philips.

Le remplacement du filtre d'entre d'air est abordé dans:

- chapitre 9 "Care and Maintenance" du manuel d'utilisateur
- chapitre 7.2 "Component Removal/Installation Air Inlet Filter" du manuel d'entretien


Étape 1 — Éteindre le respirateur





- Pressez et relâchez la touche ON/Shutdown, ceci ouvrira la page d'extinction sur l'écran..
- Sélectionnez extinction du respirateur ("Ventilator Shtudown"), qui aura pour effet d'éteindre l'appareil.
- Une extinction incorrecte peut causer l'appareil du message L'alimentation a été rétablie ("Power has been restored") la prochaine fois que le respirateur sera rallumé.

Étape 2 — Déconnecter du courant

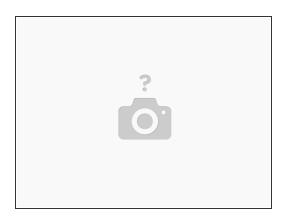

Déconnectez le respirateur artificiel du courant électrique.

Étape 3 — Retirer le panneau latéral



 Tournez l'anneau de verrouillage rapide, situé sous le panneau latéral, d'un quart de tour dans le sens antihoraire.

Étape 4 — Remplacer le filtre



- Retirez le filtre d'entrée d'air en le pinçant et en le tirant en dehors de son logement.
- Installez le nouveau filtre à air en le pliant légèrement de sorte à l'insérer dans son logement.

ID de tutoriel: 132280 - Brouillon: 2020-05-29

- 1. Replacer le panneau latéral.
- 2. Connectez le Respirateur à l'alimentation.
- 3. Allumez le respirateur avec la touche "ON/Shutdown".
- 4. Lancez le diagnostique pré-opérationnel ("preoperationnal check").